



ホープ電子

内視鏡室用商品

チャンネルクリーナーカートリッジ

内視鏡吸引鉗子チャンネルをすばやく洗浄します！

労力のかかるブラッシング作業からの開放


球状ブラシを吸引するだけ！なので簡単、スピーディ

■時間短縮

効率的に内視鏡を使用できる
洗浄者の労働時間が短縮できる

■汚れを後に残さない

一方通行のブラッシング
汚染飛沫が飛ばない

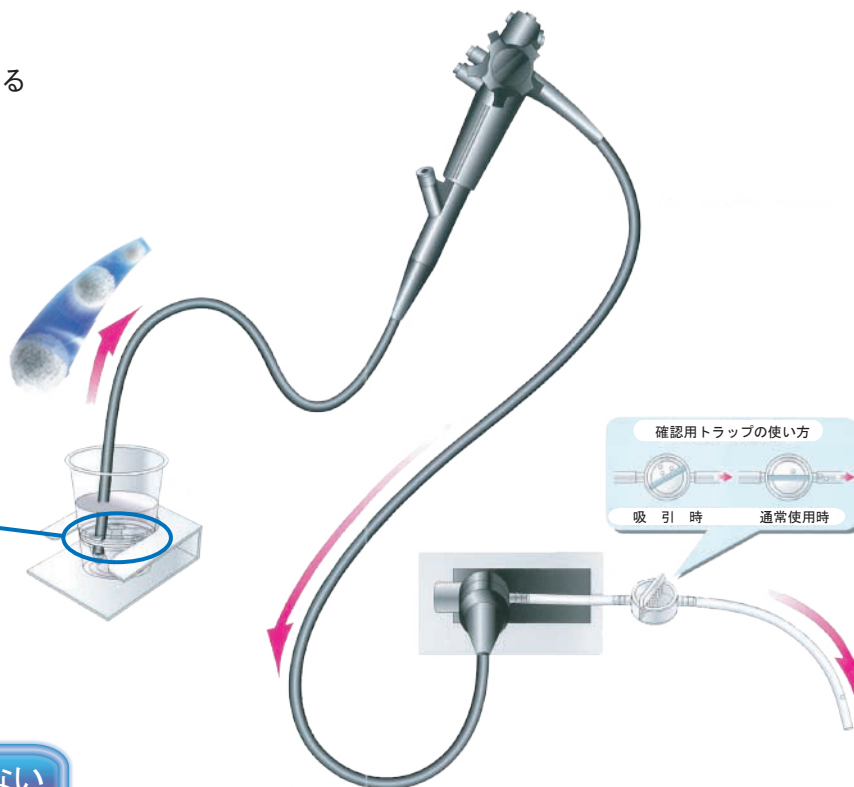


完全ディスポーザブル

- 前回までの汚れを次に引きずらない
- ブラシの劣化の心配がない

チャンネル内面を傷つけない


超極細繊維の球状ブラシ

- 太さ5ミクロンの極細繊維が凝集して三次元的に結合した多孔質繊維構造体

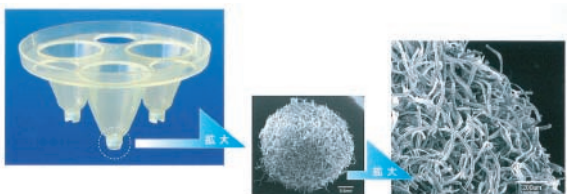

高い洗浄力

- 球状ブラシによるキメ細かな洗浄
- 洗い手に依らない高い洗浄力

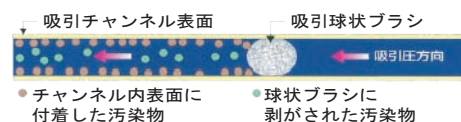



ホープ電子

内視鏡室用商品

洗浄原理と効果

- チャンネルクリーナーカートリッジの球状ブラシを洗浄剤とともに吸引することにより、チャンネル内表面に付着した血液や粘液などの汚染物を球状ブラシが押し出しブラッシングする。
- 剥がされた汚染物は、球状ブラシよりも先に吸引されるので、通過した後には残らない。
- 球状ブラシは太さ 5 ミクロンの超極細繊維が凝集して三次元的に結合した多孔質繊維構造体なので、チャンネル内面を傷つけない。

洗浄方法

1. 内視鏡外表面の清拭を行い、まず洗浄剤を 200ml 以上十分に吸引する。
2. チャンネルクリーナーカートリッジを容器にセットし、洗浄剤を注ぐ。
3. 確認用トラップ (CED-01) を吸引口金に取り付ける。
4. 内視鏡先端から球状ブラシを 3 回吸引する。
5. 確認用トラップの中に球状ブラシが 3 個出たことを確認する。
6. 鉗子孔及び吸引孔など球状ブラシが通過しない部分を、洗浄ブラシ (CEF-01) で洗浄する。
7. 以降の工程は院内マニュアルに従って行う。

製品コード	製品名	対応	色	包装
CEB-1120	チャンネルクリーナーカートリッジ チャンネル径 Φ2.0 用	オリンパス	 グリーン	150 個／箱 1,200 個／8 箱／大箱
NEW CEB-1124	チャンネルクリーナーカートリッジ チャンネル径 Φ2.4 用	富士フィルム	 ブルー	
CEB-1128	チャンネルクリーナーカートリッジ チャンネル径 Φ2.8 用	オリンパス 富士フィルム	 イエロー	
CEB-1132	チャンネルクリーナーカートリッジ チャンネル径 Φ3.2 用	オリンパス 富士フィルム	 オレンジ	

医療機器届出番号：12B2X000140008

製品コード	製品名	包装
CED-01	確認用トラップ 	1 個
CEF-01	洗浄ブラシ 	1 本

販売元

ホープ電子株式会社

〒270-2231 千葉県松戸市稔台1-22-5

TEL 047-710-3692

URL <http://www.hope-denshi.co.jp>

2020-6