

## Endo ロール




## ★ Endo ロール ロボット用 新発売 !!


“ロボット手術などのより遠くで展開が必要な症例に”

## 特長


- 内視鏡下外科手術において、挿入が困難なシート状癒着防止吸収性バリアをスムーズにかつ的確に腹腔内へ挿入できます。
- 5mmポートで使用できます。
- 再使用可能（ただし、キャップは単回使用）

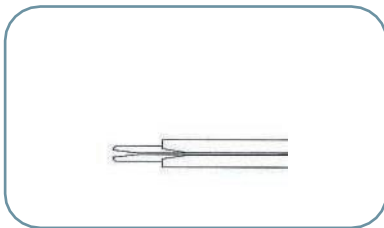

巻き取り棒の先端が外筒より1cm程見えるようにする。  
巻き取り棒のスリットと外筒のスリットの位置を合わせる。

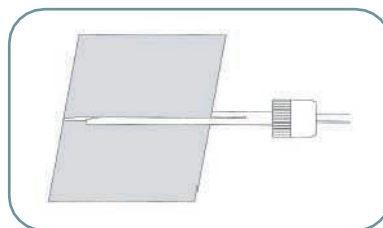

巻き取り棒の先端からシート状癒着防止吸収性バリア（シート）をスリットに挿入する。

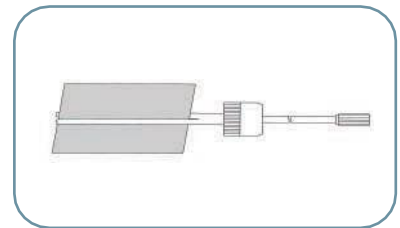

巻き取り棒をゆっくり回転させ、シートを外筒内へ完全に収納する。5mmポートから腹腔内へ挿入する。巻き取り棒をゆっくりと押し込み、シートを広げる。

製品コード	製品名	有効長	スリット長	外筒長	外筒外径
SR001	Endo ロール	300mm	70mm	200mm	Φ5.5
SR003	Endo ロール ロボット用	350mm	70mm	250mm	Φ5.5

医療機器届出番号：12B2X00014000053

製品コード	製品名	入数
HAB-C	キャップ	30個